

## I. TEST-KIT-BESTANDTEILE

- 1 Coronavirus-Antigen-Testkassette
- 2 Probenahme-Röhrchen, vorgefüllt mit Extraktionspuffer
- 3 Steriler Abstrich-Tupfer
- 4 Gebrauchsanweisung
- 5 Verschließbarer Abfallbeutel für infektiöse Abfälle



## II. WEITERE ERFORDERLICHE, NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE MATERIALIEN




1 Timer



2 Persönliche Schutzausrüstung wie beispielsweise Handschuhe


## III. PROBEENTNAHME

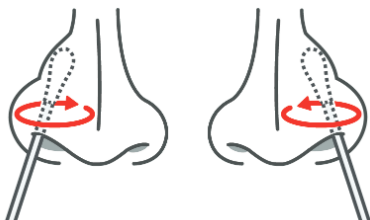

Wattepad des sterilen Abstrich-Tupfers 2,5 bis 3 cm tief in ein Nasenloch einführen. Wattepad vier bis sechs Mal mit mittlerem Druck in kreisförmigen Bewegungen an der Innenwand der Nase entlang rollen. Vorgang mit demselben Abstrich-Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen.



## IV. PROBENVORBEREITUNG

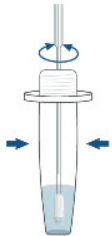

Deckel des Probenahme-Röhrchens abschrauben.  
Abstrich-Tupfer unterhalb des Flüssigkeitsspiegels im Probenextraktionspuffer des Probenahme-Röhrchens einweichen, dreimal an die Wandung drücken und für nicht weniger als 15 Sekunden darin drehen. Beim Entnehmen des Abstrich-Tupfers das Probenahme-Röhrchen zusammendrücken, damit die Flüssigkeit aus dem Wattepad des Abstrich-Tupfers herausgedrückt wird. Die Pufferlösung im Probenahme-Röhrchen wird zur Durchführung des Tests benötigt.  
Die Pufferlösung muss direkt, längstens innerhalb einer Stunde, verwendet werden.

## V. DURCHFÜHRUNG DES TESTS




- 1 Vier Tropfen der vorbereiteten Pufferlösung in das Probenloch (S) der aus dem Aluminiumbeutel entnommenen Test-Kassette geben. Die Pufferlösung muss bei Raumtemperatur (+10°C bis +30°C) verarbeitet werden.




- 2 Ergebnis nach 15 Minuten von der Test-Kassette ablesen. Nach 30 Minuten erhaltene Ergebnisse sind ungültig.


## VI. ERGEBNIS-INTERPRETATION

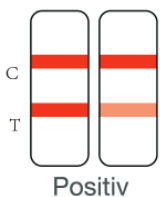

**POSITIV:**  
Erscheint eine rötliche/ magentafarbene Linie im Beobachtungsfenster an der Test-Linie (T) der Test-Kassette sowie eine rötliche/ magentafarbene Linie an der Kontroll-Linie (C), so deutet dies auf das Vorhandensein von Coronavirus-Antigen in der Probe hin. Ein Coronavirus-positiver Test zeigt zwei rötliche/ magentafarbene Linien im Beobachtungsfenster.

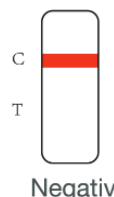

**NEGATIV:**  
Erscheint eine rötliche/ magentafarbene Linie an der Kontroll-Linie (C), jedoch keine an der Position der Test-Linie (T), so ist der Test Coronavirus-Antigen-negativ oder die Konzentration des Antigens so gering, dass sie unter der Nachweisgrenze des Tests liegt.

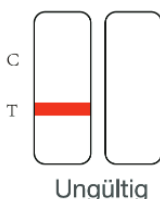

**UNGÜLTIG:**  
Erscheint keine rötliche/ magentafarbene Linie an der Position der Kontroll-Linie (C), so ist der Test ungültig. Eine neue Probe ist mit einem neuen Test-Kit zu entnehmen und zu testen.  
**Hinweis:** Die häufigste Ursache für ungültige Test-Ergebnisse ist eine nicht ausreichende Probenmenge.

